



# Hướng dẫn sử dụng

## Mặt Nạ Chống Giọt Bắn

### Model FG-F10M

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua sản phẩm này.  
 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo hiệu quả sản phẩm.  
 Hãy chắc chắn đọc “Biện pháp phòng ngừa an toàn” trước khi sử dụng sản phẩm.  
 Hãy giữ tài liệu này ở nơi bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào.



#### ◆ Tính năng sản phẩm

Đây là mặt nạ chống giọt bắn sử dụng công nghệ triệt tiêu phản xạ bề mặt (công nghệ Mắt bướm đêm \*) được phát triển trên công nghệ sản xuất màn hình Tivi LCD.

#### 【Đặc trưng】

##### 1. Phản xạ thấp

- Người đeo có tầm nhìn rõ ràng vì có độ phản chiếu ánh sáng thấp.
- Vì ánh sáng không phản chiếu vào mặt người đeo, nên người đối diện có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đeo.

##### 2. Chống mờ do hơi nước

Các giọt nước lan rộng trên bề mặt, làm tăng diện tích bề mặt và khô nhanh chóng. Điều này giúp mặt nạ không bị hơi nước làm mờ trong nhiều tình huống.

##### 3. Độ trong suốt cao và rõ ràng

Màu sắc của tấm mặt nạ là tối thiểu, và có thể đảm bảo tầm nhìn rõ ràng.

#### Sản xuất tại Nhật Bản

※ Công nghệ Moth Eye (mắt bướm đêm)

- Công nghệ tạo ra cấu trúc bề mặt lồi nano công nghiệp với kích thước từ 100 tới 200 nm, tương tự như cấu trúc mắt của bướm đêm vốn giúp chúng có thể bay ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.
- Liên tục thay đổi chiết suất thông qua các va chạm cực nhỏ ngăn cản sự phản xạ của hầu hết mọi ánh sáng.

#### ◆ Hiệu ứng cấu trúc mắt bướm đêm

	Có cấu trúc mắt bướm đêm	Không có cấu trúc mắt bướm đêm
Phản xạ thấp Truyền dẫn cao		
Chống sương mù		

◆ Thành phần :  Khung  Phim  Hướng dẫn sử dụng

#### ◆ Thông số kỹ thuật

Model	FG-F10M	
Kích thước	Khung	183mm x 153mm x 6mm (Rộng x Sâu x Cao)
	Tấm phim	195mm x 268mm x 0.18mm (Dài x Rộng x Dày)
Trọng lượng	Khung	14g
	Tấm phim	11g
Chất liệu	Khung	Polycarbonate
	Tấm phim	Polycarbonate, nhựa Acryl

◆ **Các biện pháp phòng ngừa an toàn** \*Vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau

■ Nguy hiểm và mức độ nguy hiểm nếu sản phẩm được xử lý không đúng cách.

⚠ **Cảnh báo** Có thể gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng

⚠ **Cẩn trọng** Nguy cơ bị thương nhẹ hoặc thiệt hại tài sản

⚠ **Cảnh báo** Để ngăn ngừa thương tích

- Nếu nó bị hư hỏng, không bao giờ sử dụng nó.
- Không làm sạch bằng benzene, chất pha loãng, dầu hỏa, chất tẩy rửa có tính axit, chất tẩy rửa kiềm, v.v.
- Không sử dụng trong các trường hợp có nguy cơ sao sản phẩm này sẽ rơi ra.
- Không bao giờ tháo rời hoặc sửa đổi phần thân chính và các phụ kiện.
- Không sử dụng cho trẻ em hoặc trong tầm với của trẻ sơ sinh.
- Không sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng này.
- Không sử dụng khi đang lái xe Ô tô / xe máy or xe đạp.

■ Ý nghĩa của các ký hiệu đồ họa được sử dụng trong văn bản.

⊘ **Cho biết rằng bạn không được làm**

⚠ **Cho biết rằng bạn nên làm**



⚠ **Cẩn trọng** Để ngăn ngừa thương tích

- Cẩn thận khi xử lý tấm phim sao cho các mép của tấm phim không làm tổn thương tay hoặc mặt của bạn.
- Không sử dụng nếu tấm phim bị bẩn hoặc bị hỏng.
- Lắp đặt tấm phim và khung một cách chính xác theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này.
- Ngừng sử dụng nếu bạn có bất thường trên da hoặc nếu nó không phù hợp với da của bạn.

◆ **Mục đích sử dụng**


- Sản phẩm này nhằm giảm sự tiếp xúc của các giọt chất lỏng và bụi lên mặt. Không sử dụng nó như một thiết bị bảo vệ chống lại chất rắn hoặc lửa.

◆ **Tên của từng bộ phận**

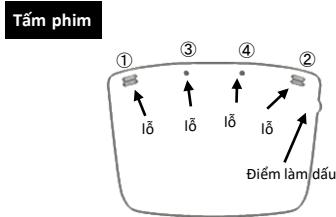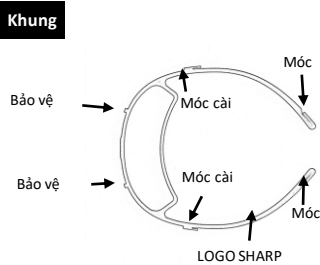

◆ **Hướng dẫn sử dụng**

☐ **Lấy tấm phim ra**

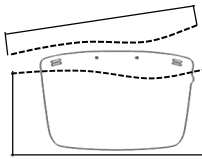


Bạn có thể ngăn không cho đầu vân tay bám vào tấm phim bằng cách chỉ chạm vào phần trên có lỗ của tấm phim và gắn vào khung.


☐ **Lỗ chuyển đổi góc tấm phim**



Hai lỗ được cung cấp để có thể thay đổi góc của tấm phim khi gắn tấm che mặt theo 2 cách. Nó trở nên nông khi gắn các móc cài của khung vào các lỗ phía trên, và nó trở nên sâu khi gắn các móc cài của khung vào các lỗ phía dưới.

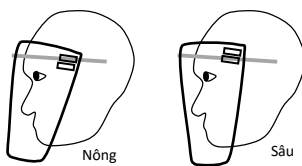

☐ **Lắp đặt**

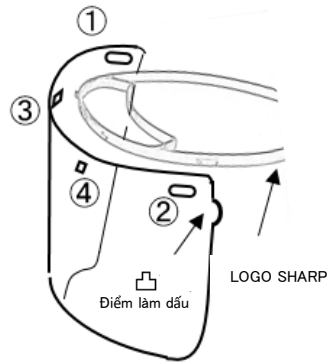

☐ **Tháo ra**

1. Tháo 2 lỗ ③④ ở giữa của tấm phim khỏi phần nhô ra trên khung.
2. Tháo các lỗ trên mặt tấm phim theo thứ tự ② → ① khỏi các móc cài trên khung.



【 Chuẩn bị 】

- Đặt điểm làm dấu trên tấm phim về phía logo SHARP trên khung.

【 Trình tự 】

1. Chèn các móc cài của khung theo thứ tự lỗ ① → ② trên mặt tấm phim.
2. Lắp các phần nhô ra của khung vào 2 lỗ ③ và ④ ở giữa tấm phim.

【 Đeo 】

- Xòe nhẹ tay cầm của khung và gắn vào đầu.

- Giữ chặt khung trên trán của bạn.

- Nếu nó bị lỏng, hãy luồn một sợi dây đàn hồi qua móc của khung và thắt chặt lại.

◆ **Bảo dưỡng**

- Nếu bề mặt tấm phim bị bẩn, ngâm khăn mềm như khăn giấy hoặc khăn lau kính với cồn tẩy rửa có bán trên thị trường (không bao gồm loại gel) hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng, và lau nó nhẹ nhàng. Nếu vết bẩn vẫn còn sau khi lau, hãy lau nhẹ bằng khăn giấy thấm nước được vắt kỹ. Tấm phim có sự lỗi lổm. Nếu bạn chà xát mạnh, sự không đồng đều sẽ bị hỏng và chức năng có thể bị suy giảm.

◆ **Thận trọng khi sử dụng**

- Không được sử dụng ở những nơi có nhiều bụi hoặc khí độc hại hoặc với mục đích ngăn chặn chúng.
- Ngừng sử dụng nếu bạn có bất thường trên da hoặc nếu nó không phù hợp với da của bạn.
- Nếu bạn cảm thấy bị bệnh khi đeo nó, hãy ngừng sử dụng.
- Nếu bạn cảm thấy đầu bị căng, hãy điều chỉnh vị trí lắp hoặc chèn một số vật liệu như đệm.
- Vui lòng tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh.
- Không sử dụng hoặc cất giữ gần lửa.
- Bảo quản sản phẩm này tránh nhiệt độ, độ ẩm cao và những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Khi vứt bỏ sản phẩm này, vui lòng xử lý theo quy định của chính quyền địa phương.